



AirFit™ F30



Full face mask

## Guía de ajuste de la mascarilla AirFit F30



1 Coloque la almohadilla UltraCompact debajo de la nariz y asegúrese de apoyarla cómodamente en la cara. Póngase el arnés por encima de la cabeza con el logotipo de ResMed del arnés hacia arriba.



2 Pase las correas del arnés por debajo de las orejas y ajuste los broches magnéticos del arnés al armazón.



3 Afloje las lengüetas de ajuste de las correas superiores del arnés y tire de modo parejo. Repita esto con las correas inferiores del arnés.



4 Si el arnés está demasiado cerca de la oreja, ajuste la correa en la coronilla.



5 Conecte el tubuladura del equipo CPAP al codo.



6 Vuelva a conectar el codo al armazón. La mascarilla está lista para usar ahora.



### Opciones adicionales

En el caso de pacientes con cabello más largo, recomendamos que el cabello se haga pasar a través de la parte trasera del arnés. Si el cabello está atado tipo cola de caballo, esta debe hacerse lo suficientemente alta como para pasar cómodamente a través de la parte trasera del arnés.

Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones y la información completa sobre la etiqueta en lo que concierne a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

\*AirFit F30 de ResMed tenía menos SKU que la mascarilla facial DreamWear y Amara View de Philips Respironics al momento de este estudio. 1 Estudio de ajuste de AirFit F30 de ResMed realizado en 75 pacientes de abril a mayo de 2018 en varios lugares de EE. UU. El estudio evaluó el rango de ajuste y la estrategia de selección del tamaño de AirFit F30, y analizó AirFit F30 de ResMed frente a Amara View de Philips Respironics (ambas son mascarillas faciales de mínimo contacto). 2 Estudio clínico guiado de AirFit F30 de ResMed realizado en 23 pacientes del 8 de junio al 24 de agosto de 2018 en Australia. El estudio analizó AirFit F30 de ResMed frente a la mascarilla facial DreamWear de Philips Respironics (ambas son mascarillas faciales de mínimo contacto). 3 Estudio clínico guiado de AirFit F30 de ResMed realizado en 21 pacientes de abril a mayo de 2018 en Australia. El estudio analizó AirFit F30 de ResMed frente a Amara View de Philips Respironics. 4 ResMed Ltd. Manual del usuario de la mascarilla AirFit F30 de ResMed. Bella Vista, Australia; 2018. 5 Koninklijke Philips N.V. Instrucciones de uso de la mascarilla facial DreamWear de Philips Respironics. Murrysville, PA; 2016. 6 Koninklijke Philips N.V. Instrucciones de uso de la mascarilla facial de mínimo contacto Amara View de Philips Respironics. Murrysville, PA; 2016. Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, visite ResMed.com. AirFit y QuietAir son marcas y/o marcas registradas de la familia de compañías de ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener información sobre patentes y otra información acerca de propiedades intelectuales, consulte ResMed.com/ip. © 2019 ResMed. 10111533 2019-07




## Mínimo contacto con máximo rendimiento

Presentamos AirFit™ F30 de ResMed, nuestra mascarilla facial de mínimo contacto que supera a la mascarilla facial de mínimo contacto de la competencia en aspectos clave importantes para usted: comodidad,<sup>1-3</sup> ajuste,<sup>2,3</sup> sellado<sup>1-3</sup> y silencio.<sup>4-6</sup> Además, hace más eficiente el proceso de pedido y gestión de inventario para su negocio con la menor cantidad de SKU.\*





## Características destacadas de AirFit F30

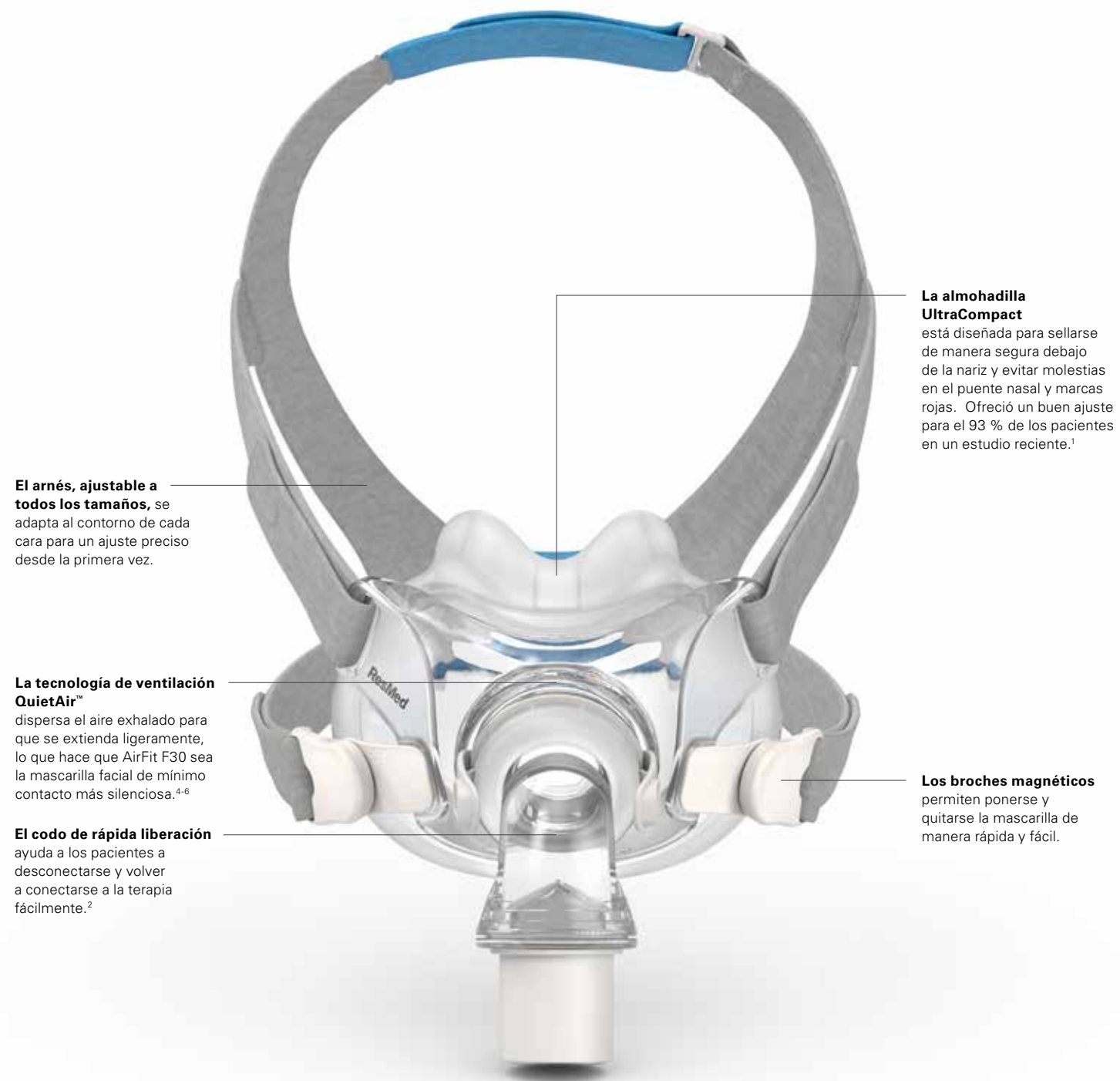

**El arnés, ajustable a todos los tamaños,** se adapta al contorno de cada cara para un ajuste preciso desde la primera vez.

**La tecnología de ventilación QuietAir™** dispersa el aire exhalado para que se extienda ligeramente, lo que hace que AirFit F30 sea la mascarilla facial de mínimo contacto más silenciosa.<sup>4-6</sup>

**El codo de rápida liberación** ayuda a los pacientes a desconectarse y volver a conectarse a la terapia fácilmente.<sup>2</sup>

**La almohadilla UltraCompact** está diseñada para sellarse de manera segura debajo de la nariz y evitar molestias en el puente nasal y marcas rojas. Ofreció un buen ajuste para el 93 % de los pacientes en un estudio reciente.<sup>1</sup>

**Los broches magnéticos** permiten ponerse y quitarse la mascarilla de manera rápida y fácil.



### Códigos del producto AirFit F30

Sistemas completos de mascarillas (incluye sistema de armazón + arnés)	Almohadilla incluida	Código del producto
AirFit F30: Pequeño	<b>S</b>	<b>64100</b>
AirFit F30: Mediano	<b>M</b>	<b>64101</b>
Sistemas de armazón (incluye armazón, almohadilla y codo)		
Sistema de armazón AirFit F30: Pequeño	<b>S</b>	<b>64155</b>
Sistema de armazón AirFit F30: Mediano	<b>M</b>	<b>64156</b>

Accesorios	Código del producto
Almohadilla AirFit F30: Pequeña	<b>64150</b>
Almohadilla AirFit F30: Mediana	<b>64151</b>
Arnés AirFit F30: Estándar	<b>64161</b>

