



AirFit™ N30i



Nasal cradle mask

Guía de ajuste de la mascarilla AirFit N30i



1 Pase el armazón y el arnés sobre la cabeza hasta que el codo esté en la parte superior y el arnés esté detrás de la cabeza.



2 Coloque la almohadilla debajo de la nariz.



3 Ajuste o afloje el arnés hasta que la almohadilla se adapte con comodidad debajo de la nariz.



4 Apriete los botones del costado en el codo y desconéctelo del armazón.



5 Conecte el tubo de aire del dispositivo al codo.



6 Vuelva a conectar el codo al armazón. La mascarilla está lista para usar ahora.



Opciones adicionales

En el caso de pacientes con cabello más largo, recomendamos que el cabello se haga pasar a través de la parte trasera del arnés. Si el cabello está atado tipo cola de caballo, esta debe hacerse lo suficientemente alta como para ajustarse cómodamente a través de la parte trasera del arnés.

Consulte el manual del usuario para obtener más instrucciones y la información completa sobre la etiqueta en lo que concierne a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

1 Estudio de ajuste de ResMed de 37 pacientes en el que se comparó AirFit N30i con Philips Respironics DreamWear en 2018. 2 Estudio clínico de ResMed de 24 pacientes en el que se comparó AirFit N30i con Philips Respironics DreamWear en 2018. Distribuido por ResMed Corp, 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA 92123 EE. UU. +1 858 836 5000 o 1 800 424 0737 (llamada gratuita). Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, visite ResMed.com. AirFit es una marca comercial y/o una marca comercial registrada de la familia de compañías ResMed. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para obtener información sobre patentes y otra información acerca de propiedades intelectuales, consulte ResMed.com/ip. © 2018 ResMed. 10110763/1 2018-10



Una experiencia con una mascarilla más natural

ResMed AirFit N30i tiene un diseño de tubo para la parte superior de la cabeza y una almohadilla con soporte nasal que permite a los pacientes dormir con libertad en la posición que elijan. El armazón SpringFit está diseñado para adaptarse al rostro de cada paciente con tan solo dos tamaños de armazón, y ayuda a optimizar el tiempo de ajuste y el control de unidad.



Características destacadas de AirFit N30i

El codo de liberación rápida permite una desconexión fácil. El codo de clip a presión se mantiene conectado al tubo para asegurarse de que las partes no se atasquen ni se pierdan.

El armazón SpringFit se ajusta automáticamente a diferentes perfiles faciales, lo que ayuda a brindar un ajuste preciso la primera vez.



El diseño de la parte superior de la cabeza brinda a los pacientes la libertad de dormir en cualquier posición y más cerca de su pareja.

Las fundas suaves están diseñadas para una comodidad adicional y una disminución de las marcas faciales.

La almohadilla con soporte curvo está diseñada para brindar un sello cómodo y estable resultando menos molesto.



Códigos de los productos AirFit N30i

Sistemas completos de mascarillas (sistema de armazón, arnés y 2 tamaños más de almohadillas)	Código del producto
AirFit N30i STPK AMER - STD	63800
AirFit N30i STPK AMER - SML	63801
AirFit N30i Sleep Lab Mask STPK - STD	63821
AirFit N30i Sleep Lab Mask STPK - SML	63822
Sistemas de armazón (incluye armazón, almohadilla y codo)	
AirFit N30i STD Frame Sys - S	63802
AirFit N30i SML Frame Sys - S	63803
AirFit N30i STD Frame Sys - M	63804
AirFit N30i SML Frame Sys - M	63805
AirFit N30i STD Frame Sys - W	63806
AirFit N30i SML Frame Sys - W	63807
AirFit N30i STD Frame Sys - SW	63808
AirFit N30i SML Frame Sys - SW	63809

Accesorios	Código del producto
AirFit N30i Cushion - SW	63810
AirFit N30i Cushion - M	63811
AirFit N30i Cushion - W	63812
AirFit N30i Cushion - S	63813
Arnés de la mascarilla AirFit 30i	63814

Datos de un estudio de pacientes

En un estudio reciente, la mayoría de los pacientes prefirieron AirFit N30i sobre las mascarillas de tubo líderes actuales del mercado.¹

86 %
encontró que la mascarilla AirFit N30i se sella muy bien.¹

90 %
encontró la mascarilla AirFit N30i muy fácil de ajustarse y adaptarse.^{1,2}

